



FAJA LUMBAR

100% elastizada.
Doble ajuste / velcro de máxima adherencia.
5 ballenas de PVC con memoria.
Cinta reflectiva trasera.
Acentúa la flexibilidad muscular.
Otorga calor terapéutico en la zona lumbar.
Mediante una confortable compresión reduce la presión sobre ligamentos, discos y vértebras.

Talles y dimensiones

S : 86 cm

M : 96 cm

L : 105 cm

XL : 110 cm

XXL : 123 cm

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1) Abra el cinturón y póngase los suspensores sobre los hombros imitando a una mochila.
- 2) Fije el cinturón en la zona lumbar (levemente sobre las caderas). Suelte las bandas exteriores.
- 3) Ajuste el panel izquierdo interior sobre el panel derecho interior, usando los seguros de velcro.
- 4) Ajuste la tensión de los suspensores.
- 5) Ajuste la banda derecha exterior sobre el velcro.
- 6) Ajuste la banda izquierda exterior sobre el velcro